

Διαβάστε πρώτα: Πληροφορίες ασφαλείας	1
Σημαντικές Πληροφορίες	2
Περιεχόμενα συσκευασίας	2
Μέρη της συσκευής και Περιγραφή.....	3
Λειτουργίες...	6
Εγκατάσταση..	7
Προγραμματισμός...	9
Συσκευή κλήσης βοήθειας “Elliot”...	11
Γενικές Πληροφορίες...	13
Συντήρηση...	13
Τεχνικά χαρακτηριστικά...	14
Περιβαλλοντικές πληροφορίες...	16
Νομικές Πληροφορίες...	16



Διαβάστε πρώτα: Πληροφορίες ασφαλείας

Πάντα να διαβάσετε και ακολουθείτε τις πληροφορίες και συμβουλές που συνοδεύονται από αυτό το σύμβολο.

Οι Χρήστες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για πιθανές παρεμβολές από άλλες συσκευές που λειτουργούν σε κοντινές συχνότητες.

Τα αφαιρούμενα μέρη στο πίσω μέρος της συσκευής δεν πρέπει να ανοίγονται παρά μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με τις οδηγίες στο έντυπο τεχνικών οδηγιών.

Αντικατάσταση των μπαταριών θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με τις οδηγίες στο έντυπο τεχνικών οδηγιών. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί για χρήση με το συγκεκριμένο προϊόν όπως αναφέρονται στο έντυπο τεχνικών οδηγιών.

Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση χρήσης λανθασμένου τύπου μπαταρίας. Ακολουθήστε τις οδηγίες απόρριψης χρησιμοποιημένων μπαταριών.

Η κεραία θα πρέπει να είναι πάντα τοποθετημένη στην συσκευή όσο αυτή είναι σε λειτουργία

Χρησιμοποιείτε μόνο τον εγκεκριμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας όπως αναφέρεται στο έντυπο τεχνικών οδηγιών.

Ο μετασχηματιστής τροφοδοσίας μπορεί να λειτουργήσει και ως μηχανισμός αποσύνδεσης. Η πρίζα στην οποία θα συνδεθεί η συσκευή πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.

Σημαντικές Πληροφορίες

Όλα τα συστήματα που χρησιμοποιούν ραδιοεπικοινωνίες και άλλα ασύρματα δίκτυα επικοινωνίας υπόκεινται σε παρεμβολές πέρα από τον έλεγχο του χρήστη.

Τα προϊόντα της DoroCare έχουν σχεδιαστεί ώστε να ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις των εν λόγω παρεμβολών. Παρ' όλα αυτά, ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι στοιχεία του συστήματος μπορεί να υποβληθούν σε παρεμβολές ή άλλες επιρροές που μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία.

Επομένως, είναι σημαντικό να ελέγχετε τακτικά ότι κάθε μέρος του συστήματος λειτουργεί σε όλους τους χώρους, ιδιαίτερα οι ραδιοεπικοινωνίες. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας αμέσως σε περίπτωση οποιασδήποτε ύποπτης δυσλειτουργίας. Οι χρήστες θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στον κίνδυνο παρεμβολής προϊόντων τα οποία επικοινωνούν με τις ίδιες ή σε γειτονικές συχνότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο συντήρησης.

Περιεχόμενα Συσκευασίας

Doro CareIP Κεντρική μονάδα επικοινωνίας

- Καλώδιο δικτύου (UTP Cat5e TIA568B)
- Τροφοδοτικό
- Κεραία
- Οδηγός χρήστη
- Συσκευή κλήσης βοήθειας Elliot με αξεσουάρ:
- Περιβραχιόνιο
- κούμπωμα περιβραχιονίου
- περιλαίμιο
- κούμπωμα περιλαίμιου
- κλιπ τσέπης
- Εργονομικό αξεσουάρ για ευκολότερη πίεση του πλήκτρου κλήσης βοήθειας.

Μέρη της συσκευής και Περιγραφή

Ενδεικτικές λυχνίες:

1. Λυχνία ALARM: Κόκκινο

Σταθερά αναμμένο: κατάσταση λειτουργίας/αναμονής

Αναβοσβήνει: κατάσταση συναγερμού

2. Λυχνία τροφοδοσίας/λειτουργίας Πράσινο

Σταθερά αναμμένο: κανονική τροφοδοσία ρεύματος

Αναβοσβήνει: Διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος ή λειτουργία προγραμματισμού.

3. ! Λυχνία ένδειξης σφάλματος: Κόκκινο

Σβηστό: Κανονική λειτουργία.

Σταθερά αναμμένο: Πρόβλημα με την σύνδεση του Ethernet ή πρόβλημα ρύθμισης IP.

Αναβοσβήνει αργά: Η εγγραφή στο διακομιστή SIP απέτυχε.

4. + Λυχνία ένδειξης κατάστασης: κόκκινο/πράσινο

Σβηστό: Κανονική λειτουργία.

Σταθερά αναμμένο κόκκινο φως: Δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο GSM

Εναλλασσόμενα κόκκινο και πρά-
σινο φως: Εκτός λειτουργίας.

Κεραία

5. Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία στην υποδοχή της κεραίας, δείτε την επισκόπηση συνδέσεων

Πλήκτρα (με τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες):

6. Πράσινο κουμπί: Ακυρώνει την κλήση έκτακτης ανάγκης

7. Κίτρινο Κουμπί: Κουμπί λειτουργιών

8 Κόκκινο κουμπί: Ενεργοποιεί το συναγερμό, πραγματοποιεί κλήση έκτακτης ανάγκης.

Σημείωση! Το κίτρινο κουμπί δεν έχει καμία λειτουργία κατά την παράδοση, αλλά είναι προγραμματιζόμενο για ειδικές λειτουργίες.

Επισκόπηση συνδέσεων

1. Έλεγχος έντασης ήχου: Δυνατότητα προγραμματισμού έντασης των ηχείων σε 8 επίπεδα.

2. Κορδόνι κλήσης βοήθειας : Βάση σύνδεσης για κορδόνι κλήσης βοήθειας. Το κορδόνι μπορεί να τοποθετηθεί στην συσκευή μόνο όταν είναι τοποθετημένη στον τοίχο. Το κορδόνι κλήσης βοήθειας δεν συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία και παραγγέλλεται ξεχωριστά.

3. Οπές για τοποθέτηση σε τοίχο

4. Θέση μπαταρίας

5. I/O: Υποδοχές για εισόδους και εξόδους καλωδίων

6. θύρα Ethernet: Σύνδεση για καλώδιο Ethernet από ευρυζωνικό / δίκτυο.

7. DC: Σύνδεση για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 7,5VDC.

8. Διακόπτης λειτουργίας: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την συσκευή Doro CareIP Mobile

9.Υποδοχή κεραίας: Στην συσκευασία συμπεριλαμβάνεται η συνιστάμενη κεραία, αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μια άλλη θα πρέπει πρώτα να προσαρμοστεί για χρήση με την συσκευή της Doro CareIP Mobile.

10. Κάρτα SIM: Δείτε πως μπορείτε να τοποθετήσετε την κάρτα sim σελ.7

ΠΡΟΣΟΧΗ. Τα αφαιρούμενα μέρη της συσκευής πρέπει να ανοίγονται και οι συνδέσεις καλωδίων πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με τις οδηγίες στο έντυπο τεχνικών οδηγιών.

Περιγραφή λειτουργιών

Η Doro CareIP Mobile είναι μια ψηφιακή συσκευή σήμανσης έκτακτης ανάγκης με ενσωματωμένη μονάδα GSM, η οποία έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει σήματα συναγερμού μέσω ευρυζωνικών δικτύων και δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Η συσκευή αυτή προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα αμφίδρομης φωνητικής επικοινωνίας χρησιμοποιώντας υπάρχοντα πρότυπα για κλήσεις VoIP. Η συσκευή χρησιμοποιεί SIP, ένα τυπικό πρωτόκολλο για την έναρξη ομιλίας και βίντεο μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων. Εκτός από τις φωνητικές κλήσεις η συσκευή Doro CareIP Mobile είναι και μια πλατφόρμα μεταφοράς λεπτομερών πληροφοριών συναγερμού, μηνυμάτων ομιλίας, ιατρικών πληροφοριών και απευθείας καταστάσεις συνδέσεων κ.λπ.

Η συσκευή κλήσης βοήθειας Elliot είναι προσαρμοσμένη για χρήση με αυτή την συσκευή. Ανατρέξτε στις οδηγίες σχετικά με την συσκευή κλήσης βοήθειας Elliot, σελ.11.

Ενεργοποίηση κλήσης βοήθειας

Η κλήση βοήθειας μπορεί να πραγματοποιηθεί:

1. πατώντας το πλήκτρο σε μια συσκευή κλήσης βοήθειας
2. πατώντας το κόκκινο πλήκτρο της συσκευής Doro CareIP Mobile.
3. τραβώντας το κορδόνι κλήσης βοήθειας (διαθέσιμο μόνο όταν η συσκευή Doro CareIP Mobile είναι τοποθετημένη στον τοίχο). Το κορδόνι κλήσης βοήθειας δεν συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία και παραγγέλλεται ξεχωριστά. Κατά την ενεργοποίηση, η συσκευή Doro CareIP Mobile καλεί το κέντρο διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών προκειμένου να προσφέρει την κατάλληλη υποστήριξη. Υπάρχει η δυνατότητα να συνδέσετε έως και τέσσερις διαφορετικές ενσύρματες συσκευές κλήσης βοήθειας.

Ασύρματοι πομποί έκτακτης ανάγκης

Μέχρι δέκα ραδιοπομποί μπορούν να συνδεθούν με την συσκευή Doro CareIP Mobile, π.χ. ασύρματες συσκευές κλήσης βοήθειας, ανιχνευτές καπνού, μονοξειδίου του άνθρακα κτλ. Σε περίπτωση εκπομπής σήματος συναγερμού από ένα ραδιοπομπό, η κατάσταση της μπαταρίας του ραδιοπομπού δοκιμάζεται.

Δέκτες συναγερμού

Μέχρι δέκα δέκτες συναγερμού μπορούν να προγραμματιστούν. Το είδος της έκτακτης ανάγκης ταυτοποιείται χρησιμοποιώντας έναν κωδικό συναγερμού που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή Doro CareIP Mobile. Όταν ο συναγερμός αποστέλλεται σε ιδιωτικό δέκτη προσδιορίζεται από μια ηχογραφημένη φωνητική ταυτότητα. Ο δέκτης του συναγερμού μπορεί στη συνέχεια να μιλήσει αμφίδρομα με το πρόσωπο που έχει ενεργοποιήσει τον συναγερμό και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

Άλλες λειτουργίες

Πρόσθετες λειτουργίες μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να αλλάξουν με τον κατάλληλο προγραμματισμό - ανατρέξτε στο εγχειρίδιο συντήρησης ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Εγκατάσταση

Εγκατάσταση της κάρτας sim

- Ξεβιδώστε τη βίδα ασφαλείας στο κάλυμμα της θήκης της κάρτας SIM.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης.
- Τοποθετήστε την κάρτα SIM, σύμφωνα με την εικόνα.
- Τοποθετήστε το κάλυμμα και τη βίδα ασφαλείας της θήκης της κάρτας SIM

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 1234 ή 0000 δεν είναι κατάλληλοι κωδικοί PIN για την κάρτα SIM, εάν χρησιμοποιείται κάποιους από αυτούς τους κωδικούς PIN θα πρέπει να τον αλλάξετε πριν από την εγκατάσταση. Αλλαγή του κωδικού PIN κατά προτίμηση γίνεται με τη χρήση ενός κινητού τηλεφώνου.

Σύνδεση

Η συσκευή Doro CareIP Mobile είναι εύκολη στην εγκατάσταση, εάν χρησιμοποιείται ευρυζωνική σύνδεση / δίκτυο, η σύνδεση γίνεται με το καλώδιο δικτύου που συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία. Κανονικά η Doro CareIP Mobile έχει ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί DHCP, που σημαίνει ότι στην μονάδα αυτόματα θα εκχωρηθεί μια διεύθυνση IP όταν συνδεθεί σε ένα δίκτυο. Η συσκευή Doro CareIP Mobile θα πρέπει πάντα να συνδέεται όσο πιο κοντά στο εισερχόμενο ευρυζωνικό δίκτυο γίνεται.

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό (1) στην πρίζα και το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή εισόδου DC.
2. Συνδέστε το καλώδιο δικτύου (2) από το ευρυζωνικό / δίκτυο στην υποδοχή Ethernet της συσκευής Doro CareIP Mobile.

- Γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση I.
- Ελέγξτε ότι η ενδεικτική λυχνία On! έχει σταθερό πράσινο φως.
- Η λυχνία κατάστασης θα σβήσει μέσα σε 60 δευτερόλεπτα, αν εντοπιστεί το δίκτυο GSM.
- Διεξάγετε δοκιμή κλήσης/συναγερμού από την συσκευή Doro CareIP Mobile.

Σημείωση! Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να τοποθετείτε έτσι ώστε το αυτοκόλλητο με το πληροφοριακό κείμενο do not unplug να είναι ορατό.

Για περισσότερες συμβουλές σχετικά με την εγκατάσταση, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα, σύμφωνα με το έντυπο τεχνικών οδηγιών.

Προγραμματισμός

Επαφές, κωδικοί συναγερμού και ρυθμίσεις έχουν προγραμματιστεί από τον προμηθευτή σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συσκευή Doro CareIP Mobile μπορεί να ανά-προγραμματιστεί από τον προμηθευτή. Για βοήθεια σχετικά με τον προγραμματισμό, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο συντήρησης ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Σύνδεση συσκευών κλήσης βοήθειας και άλλων ανιχνευτών κινδύνου.

Μέχρι δέκα (10) ασύρματες συσκευές κλήσης βοήθειας ή άλλοι ραδιοπομποί μπορούν να συνδεθούν με την συσκευή Doro CareIP Mobile.

Σύνδεση ραδιοπομπών:

- Κρατήστε πατημένο το πράσινο κουμπί στην συσκευή Doro CareIP Mobile για περίπου τέσσερα δευτερόλεπτα, μέχρι το πράσινο φως «On» αρχίσει να αναβοσβήνει.
- Πιέστε το πλήκτρο της ασύρματης συσκευής κλήσης βοήθειας. Μόλις η συσκευή Doro CareIP Mobile λάβει το σήμα, θα ακούσετε ένα διακριτό ηχητικό σήμα.
- Επιβεβαιώστε πατώντας το κόκκινο κουμπί της συσκευής Doro CareIP Mobile, θα ακούσετε έναν ήχο επιβεβαίωσης.

Ελέγξτε την εμβέλεια σήματος/επικοινωνίας των συσκευών

Πάντα να ελέγχετε την σωστή λειτουργία μετά την εγκατάσταση και τον προγραμματισμό.

- Κρατήστε πατημένο το πράσινο κουμπί στην συσκευή Doro CareIP Mobile για περίπου τέσσερα μέχρι το πράσινο φως «On» αρχίσει να αναβοσβήνει.
- Πιέστε το πλήκτρο της ασύρματης συσκευής κλήσης βοήθειας. Μόλις η συσκευή Doro CareIP Mobile λάβει το σήμα, θα ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο.

Ελέγξτε την ισχύ του σήματος GSM

Όταν ξεκινάει η λειτουργία της συσκευής Doro CareIP Mobile, η ισχύς του σήματος GSM θα πρέπει να επαληθεύεται.

- Κρατήστε πατημένο το κίτρινο κουμπί της συσκευής Doro CareIP Mobile για περίπου τέσσερα δευτερόλεπτα, μέχρι να ακουστεί ο ήχος από την συσκευή, αφήστε το κουμπί.
- Πατήστε το κουμπί ελέγχου έντασης μέσα σε 4 δευτερόλεπτα, εμφανίζεται η λειτουργία συντήρησης.
- Πατήστε το κίτρινο κουμπί μία φορά, εμφανίζεται ο χρήστης.
- Πατήστε το κόκκινο κουμπί μία φορά, εμφανίζεται η λειτουργία του χρήστη.
- Πατήστε το κίτρινο κουμπί δύο φορές, εμφανίζεται το σήμα GSM.
- Πατήστε το κόκκινο κουμπί μια φορά, η ισχύς σήματος GSM εμφανίζεται μαζί με μια τιμή μεταξύ 0-31. Όσο

υψηλότερη είναι η τιμή τόσο υψηλότερη είναι η ισχύς του σήματος. Η τιμή θα πρέπει να είναι κατ' ελάχιστον 15 για σωστή επικοινωνία. Εάν αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί, προσπαθήστε να μετακινήσετε τη συσκευή σε διαφορετικές τοποθεσίες στην κατοικία μέχρι να πληρείται η αποδεκτή τιμή.

Σημείωση! Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί η αποδεκτή τιμή τότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια εξωτερική κεραία.

Ελέγξτε τη λειτουργικότητα

Πάντα να ελέγχετε τη λειτουργία μετά την εγκατάσταση και τον προγραμματισμό. Οι δοκιμαστικοί συναγερμοί/κλήσεις πρέπει να γίνονται τακτικά και με τέτοιο τρόπο ώστε να διαπιστώνεται η καλή λειτουργία του συνόλου της αλυσίδας συναγερμού/κλήσης, από τους πομπούς μέχρι και τον δέκτη συναγερμού/κλήσης (κέντρο διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών).

Ασύρματη συσκευή κλήσης βοήθειας Elliot

Η ασύρματη συσκευή κλήσης βοήθειας Elliot χρησιμοποιεί αμφίδρομη ραδιοεπικοινωνία, αυτό σημαίνει πως όταν η Κεντρική μονάδα επικοινωνίας Doro CareIP Mobile λάβει μια ειδοποίηση από την συσκευή κλήσης βοήθειας Elliot θα στείλει πίσω επιβεβαίωση λήψης σήματος. Αυτό φαίνεται στην συσκευή Elliot από την αλλαγή χρώματος της φωτεινής λυχνίας από κόκκινο σε πράσινο. Αν η συσκευή Elliot δεν πάρει κανένα σήμα η κλήση θα πρέπει να επαναληφθεί. Η συσκευή κλήσης βοήθειας Elliot διαθέτει δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Η συσκευή κλήσης βοήθειας Elliot μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως περιβραχιόνιο, περιλαίμιο ή με κλιπ στην τσέπη. Το εξάρτημα της Doro Care Easy Press Concept (EPC) απλοποιεί τη χρήση για άτομα με μειωμένη σωματική ικανότητα ή/και δύναμη επιτρέποντας τους να ενεργοποιούν εύκολα τον συναγερμό.

Τα αξεσουάρ συνδέονται εύκολα με ένα απλό κλικ.

- 1.Ενδεικτική λυχνία
2. Κουμπί Συναγερμού
3. Κουμπί Λειτουργίας

Κούμπωμα περιβραχιονίου

- 1.κούμπωμα περιλαίμιου
- 2.προστατευτικό κάλυμμα

Εξάρτημα (EPC) για εύκολο πάτημα

Το αξεσουάρ (EPC) καθιστά την ενεργοποίηση του συναγερμού πιο εύκολη για τα άτομα με μειωμένη σωματική ικανότητα ή/και δύναμη.

- κλιπ τσέπης
- προστατευτικό κάλυμμα

Γενικές πληροφορίες

- Η συσκευή Doro CareIP Mobile θα πρέπει πάντα να συνδέεται όσο πιο κοντά στο εισερχόμενο ευρυζωνικό δίκτυο γίνεται.
- Επαλήθευση της κάλυψης GSM πρέπει να γίνεται πάντα κατά την εγκατάσταση.
- .Για να αποσταλεί ένα σήμα συναγερμού, τουλάχιστον ένας προορισμός/κέντρο διαχείρισης επειγόντων περιστατικών πρέπει να προγραμματιστεί.
- Η κεντρική μονάδα δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται με υπεύθυνο τρόπο.

Καθάρισμα

Η συσκευή, οι φορητές συσκευές κλήσης βοήθειας και οι ανιχνευτές θα πρέπει να καθαρίζονται με ένα ελαφρά υγρό πανί. Διαλύτες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τον καθαρισμό.

Συμβουλή: παραγγέλλοντας το πλήρες ανταλλακτικών μπορείτε να κάνετε την μεταχειρισμένη σας συσκευή Elliot να φαίνεται σαν καινούρια.

Συντήρηση

Αντικατάσταση μπαταρίας της κεντρικής μονάδας επικοινωνίας

Η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως μόλις αντιληφθούμε την σχετική ένδειξη από το μηχάνημα ή μετά το πέρας τριών ετών.

Αντικατάσταση μπαταρίας στην συσκευή κλήσης βοήθειας

Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες της συσκευής κλήσης βοήθειας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο συντήρησης ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η αντικατάσταση της μπαταρίας πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα, σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο συντήρησης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Συσκευή Doro CareIP Mobile

Διαστάσεις: 200 mm x 175 mm x 35 mm (ΥxΠxB)

Τροφοδοσία: 7,5 VDC τροφοδοτικό, (PoE προαιρετικό)

Κατανάλωση: 2W (ονομαστική)

Εφεδρική μπαταρία: 4.8V NiMH

Χρόνος λειτουργίας με εφεδρική μπαταρία: μέχρι δύο ημέρες

Είσοδοι: Τέσσερις (4) εισόδους

Έξοδοι: Τρεις (3) εξόδοι, μία (1) Έξοδος ρελέ, max 0,7A

Επικοινωνία: IP / (SIP), GSM

Ραδιοσυχνότητες: 869,2-869,25 MHz

Τάξη δέκτη: 1 *

Αριθμός ραδιοπομπών: Έως και 10

GSM

επικοινωνία: GSM quad band

GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz

GPRS class: 10

διασύνδεσης της κάρτας SIM: 1,8V και 3V

Φορητή συσκευή κλήσης βοήθειας/ενεργοποίησης συναγερμού Elliot

Διαστάσεις: 45 mm x 30 mm x 13 mm (ΥxΠxB)

Μπαταρία: 3V μπαταρία Λιθίου CR2430

Διάρκεια ζωής της μπαταρίας: Έως και πέντε έτη

Αντοχή στο νερό: IP67

Radio frequency band 869,2-869,25 MHz

Ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 869,2-869,25 MHz

Radio frequency power max. 3,16mW (5 dBm)

ραδιοφωνική συχνότητα ρεύματος μέγιστη 3,16mW (5 dBm)

Equipment class Class 1 radio equipment

Εξοπλισμός κατηγορίας 1 εξοπλισμός ραδιοφώνου

Περιβάλλον

Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους σε κανονικό οικιακό περιβάλλον.

Θερμοκρασία: Θερμοκρασία λειτουργίας 5 ° C (41 ° F) έως 35 ° C (95 ° F)

Υγρασία: 0% έως 75% σχετική υγρασία (μη υγροποιημένη) Περιβαλλοντική κατηγορία: 1 (EG-I)

* Αναφέρεται στο ραδιόφωνο μονάδα C1, τύπου 9340.

Radio receiver parameters:

Max. usable sensitivity: -113dBm

Average usable sensitivity: ver: 28,7dBuV/m, hor: 27,0dBuV/m

Adjacent channel selectivity: -26,2dBm/-28,2dBm

Intermodulation rejection: -36dBm/-37dBm

Spurious response rejection: -30dBm

Blocking or desensitisation: -16dBm

Παράμετροι ραδιοφωνικού δέκτη

Μέγιστη ευαισθησία: -113dBm

Μέση ευαισθησία: ver: 28,7dBuV / m, hor: 27,0dBuV / m

επιλεκτικότητα καναλιών: -26,2dBm / -28,2dBm

απόρριψη Ενδοδιαμόρφωση: -36dBm / -37dBm

απόρριψη απάντηση: -30dBm

Αποκλεισμός ή απευαισθητοποίηση: -16dBm

Doro CareIP Mobile μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με το ραδιόφωνο τύπου 9320, το οποίο επιτρέπει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και περιλαμβάνει τη λήψη μετάδοσης, αυτόματη επανάληψη μετάδοσης, έλεγχος ισχύος και έλεγχος συχνότητας. Δείτε τις πληροφορίες για την ένδειξη ραδιοφώνου όπου η μονάδα είναι εξοπλισμένη.

Δήλωση συμμόρφωσης

Δια του παρόντος η Doro Care AB, δηλώνει ότι ο εξοπλισμός, συμμορφώνεται με τις διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EC (R & TTE) και 2011/65 / EC (RoHS2). Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση: www.doro.com/dofc

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών της ΕΕ 2012/19/EU (AHHE) και 2006/66/EG (μπαταρίες)

Οι οδηγίες αυτές ρυθμίζουν την ευθύνη των προϊόντων για την ανακύκλωση ηλεκτρικών ειδών και μπαταρίας με σκοπό την αύξηση της ανακύκλωσης και την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων. Η ενότητα επισημαίνεται με το λογότυπο «διαγραμμένο τροχοφόρο κάδο», το οποίο δείχνει ότι η συσκευή πρέπει να παραδοθεί για ανακύκλωση.

Το προϊόν μπορεί να επιστραφεί χωρίς χρέωση, σε ένα σταθμό ανακύκλωσης που συνδέεται άμεσα ή μέσω ενός συστήματος ανακύκλωσης της Doro CareIP Mobile ή στο διανομέα σας.

Για λεπτομερείς οδηγίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το διανομέα σας ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.doro.com. Σημείωση! Οι πληροφορίες WEEE και οδηγίες ανακύκλωσης ισχύει μόνο για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για άλλες χώρες, παρακαλώ ελέγξτε την τοπική νομοθεσία ή επικοινωνήστε με το διανομέα σας. Κατασκευάζεται σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2011/65 / ΕΕ (RoHS2). Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο περιβραχιόνιο και στο περιλαίμιο είναι σύμφωνα με τις κλωστοϋφαντουργικές απαιτήσεις ασφαλείας του Oeko-Tex Standard 100.

Νομικές πληροφορίες

Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες Lifelink I.K.E διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Τίποτα στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η Lifelink I.K.E δεν θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις που περιέχονται στο παρόν.

